

# STOP OVERMATIG ZWETEN.

# HIDREX® THERAPIE



## Behandeling tegen overmatig zweten!



Handen



Voeten



Oksels



Gezicht



### classic ION

- Gelijk- en Pulse stroommethoden
- Opstellen van behandelprofielen



### concept ION

- Automatisch behandelingsproces
- Intelligente detectie van therapieparameters



### comfort ION

- Variabele pulsstroom
- Automatische polariteitswissel
- Instelbare tijd

**Gelijkstroom (GS):**

- ⚡ 100% Stroomafgifte geen pauze
- ⊕ Hoogste effectiviteit
- ⊖ Sterk gevoel van elektriciteit, gebruik bij gevoelige huid of kinderen vaak niet mogelijk.
- ➡ **Therapie voor de voeten**


**Pulsstroom (PS):**

- ⚡ 60% Stroomafgifte (pulse) en 40% pauze
- ⊕ Laag elektriciteitsgevoel
- ⊖ Iets minder effectief door pauzetijden, gebruik bij ernstige hyperhidrose soms niet voldoende
- ➡ **Therapie van gevoelige huidgebieden**

**Variabele Pulsstroom (VPS):**

- ⚡ Instelbare Pulsbreedte (70% / 80% / 90%)
- ⊕ Het beste van GS en PS, hoge effectiviteit zonder enig gevoel van irritatie, optimale aandacht van individuele behoeften en gevoelens
- ➡ **Therapie voor alle gebieden; vooral voor de behandeling van handen of gevoelige huidzones en kinderen**


Variabele pulsstroom (VPS): Hoge effectiviteit gecombineerd met minimaal stroomgevoel

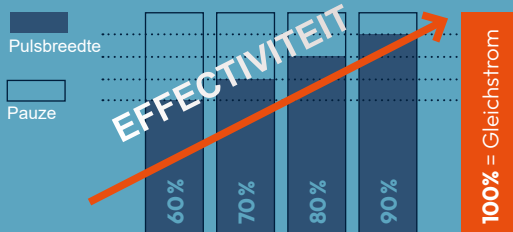

De figuur hierboven laat zien hoe de effectiviteit van de behandeling toeneemt naarmate de pulsbreedte toeneemt.

Parameter	classic ION	concept ION	comfort ION
<b>Gelijkstroom (GS)</b>		ja	
<b>Pulsstroom (PS)</b>		ja	
<b>Variabele Pulsstroom (VPS)</b>	nee	ja     en kinderen	
<b>Automat. Polariteitswissel</b>		nee	ja
<b>Programmeerbare profielen</b>	3	nee 2 modi	3
<b>App connectiviteit (Android)</b>		nee	
<b>Detectie van therapieparameters</b>	nee	ja, automatisch Dosis, Stroomsoort, Duur	nee
<b>Therapiedosis</b>	digital 4-60 V	8 Levels	digital 4-60 V
<b>Therapie-Timer</b>		ja, digital	
<b>Behandelingstijd</b>	15 Min.	automatisch (10-20 Min.)	1-60 Min.
<b>Anti Schok Elektronik (ASE)</b>		ja	
<b>Over therapie bewaking</b>		ja	
<b>Monitoring van onderdompeling</b>		ja	
<b>max. stroombereik</b>		60 V / 30 mA	
<b>Stroomvoorziening</b>		110-240 V~; 50-60 Hz	
<b>Afmeting</b>		besturingseenheid: 190 x 137 x 49 mm (BxDxH)	
<b>Gewicht</b>		Besturingseenheid 0,4 kg	

**Accessoires**

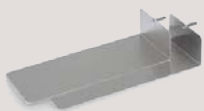

**Aluminium elektroden** standaard passend voor ergonomische bakken en kofferdelen ten behoeve van hand- of voetbehandeling. Deze elektroden zijn van anti-allergeen aluminium dus ook te gebruiken als u last heeft van een nikkel- of chroomallergie.



**Duo-set voor het tegelijkertijd behandelen** van de handen en voeten. Met het speciale Duo-set, bestaande uit ergonomisch gevormde bakken, handen/voeten elektroden, afdekmatjes en speciale verbindingskabels is het mogelijk de handen en voeten tegelijkertijd op hetzelfde voltage te behandelen.



Om bij de behandeling van handen of voeten direct huidcontact met het metaal van de behandel-elektroden te voorkomen, zijn **afdematten voor de elektroden** nodig. De kunststof gaasmatten zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk, gemakkelijk te desinfecteren en duurzaam.



**Accessoires voor okselbehandeling.** De speciale applicators voor een optimale behandeling van de oksels worden gebruikt als alternatief voor accessoires voor handen of voeten.



**Ergonomisch gevormde behandelbakken** vooral bij behandeling van de handen. De bakken met afgeronde kanten bieden optimale ondersteuning voor de onderarmen en een comfortabele zitpositie bij het behandelen van de handen.



**Gezichtsmasker.** Met deze speciale siliconenelektrode, inclusief flexibele hoofdbanden en vervangbare spons-applicatie, worden de contactoppervlakken in het gezicht effectief behandeld.

